

INSTRUÇÕES DE USO

Mepitac®

Nome Técnico: Esparadrapos e Fitas Adesivas

Nome Comercial: Mepitac®

Verifique no rótulo do produto a versão da instrução de uso correspondente. Não utilize instrução de uso com versão diferente daquela indicada no rótulo do produto.

Obtenha a Instrução de Uso através do endereço eletrônico:
<http://www.molnlycke.com.br/instrucoesdeuso/>.

O formato impresso também poderá ser adquirido através do telefone:
(90 11) 3016-8900 (SAC) sem custo adicional.

“Produto médico não estéril”

“Fabricante recomenda uso único”

ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR, LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES. OBSERVE OS AVISOS E PRECAUÇÕES APRESENTADOS PARA ASSEGURAR A EFICIENTE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.

APRESENTAÇÕES COMERCIAIS DO PRODUTO MÉDICO

As embalagens unitárias do produto médico estão acondicionadas em caixa de papelão nas seguintes quantidades:

Código do Produto	Produto e Dimensão	Quantidade por embalagem secundária
298300	MEPITAC® 2cm x 3m	1
298400	MEPITAC® 4cm x 1.5m	1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Mepitac[®] é uma fita adesiva muito adaptável, fácil de aplicar e de remover. O Mepitac[®] é adequado para pacientes que requerem aplicação e remoção repetidas, pois oferece uma remoção suave à pele e pelos do corpo, e fornece uma fixação segura.

Se for necessário inspeção ou reposicionamento, o Mepitac[®] pode ser levantado e reaplicado. O Mepitac[®] não deixa resíduos.

O Mepitac[®] é resistente a água.

COMPOSIÇÃO

- Uma camada de contato Safetac^{®*}
- Uma camada de malha adaptável
- Um filme de poliuretano respirável e a prova de água.

Componentes do material: Filme de poliuretano, adesivo acrílico, malha de poliéster/poliamida, camada de silicone adesivo e filme de polietileno.

*Safetac[®] é uma tecnologia de adesividade de silicone única, que minimiza a dor nos pacientes e o trauma à pele no momento da remoção do curativo.

INDICAÇÃO DE USO

O Mepitac[®] é indicado para a fixação de dispositivos médicos como drenos, tubos, sondas, eletrodos, cânulas IV e curativos. Além disso o Mepitac[®] oferece uma proteção suave à pele quando utilizado sob dispositivos como tubos.

MODO DE UTILIZAÇÃO

O Mepitac[®] pode ser utilizado por pessoa leiga sob supervisão de profissional de saúde.

1. Assegure-se que a pele esteja limpa, seca e sem creme/pomada;
2. Corte o comprimento desejado da fita utilizando uma tesoura;
3. Retire o papel protetor e aplique o Mepitac[®] sem esticar;
4. Se for necessário inspecionar ou re-inspecionar a área, o Mepitac[®] pode ser retirado e depois reaplicado.

Troque o Mepitac[®] quando suas propriedades adesivas não forem mais suficiente.



PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- O Mepitac[®] não se destina à fixação de dispositivos que salvam e sustentam vidas.
- Não reutilizar. Se reutilizado, o desempenho do produto poderá deteriorar-se e poderá ocorrer contaminação cruzada.
- As propriedades adesivas do Mepitac[®] podem diminuir quando este for utilizado em condições úmidas tais como incubadoras ou em pacientes com febre ou que transpirem muito.
- Se algum incidente sério ocorrer, relacionado ao Mepitac[®], este deve ser reportado a Molnlycke Health Care.

CONTRAINDICAÇÕES

- Não use o Mepitac[®] em pacientes ou usuários com hipersensibilidade conhecida aos materiais ou componentes do produto.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazenar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).

Transportar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).

DESCARTE

Deve ser seguido um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS - para o manejo, segregação e acondicionamento de resíduos conforme as diretrizes da RDC 222 de 2018 ou suas atualizações.

VALIDADE: Vide embalagem (03 anos)

REGISTRO ANVISA: 80733280004

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rejane Vasques Biembengutt – CRBM 9150

E-MAIL: tecnovigilanciabr@molnlycke.com

IMPORTADOR:

MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Av. Portugal, nº 1100, Parte C-43, Bairro Itaqui, ITAPEVI / SP. CEP: 06696-060

CNPJ: 12.600.168/0001-17



FABRICANTE LEGAL:

Mölnlycke Health Care AB, Gamlestadsvagen 3C, PO Box 13080, Gotenborg, SE-402
52 – Suécia.

Fabricado na Finlândia.