

**INSTRUÇÕES DE USO**  
**TUBIFAST® COM 2-WAY STRETCH**

**Nome técnico:** Bandagem

**Nome comercial:** Tubifast® com 2-Way Stretch

**Verifique no rótulo do produto a versão da instrução de uso correspondente. Não utilize instrução de uso com versão diferente daquela indicada no rótulo do produto.**

**Obtenha a Instrução de Uso através do endereço eletrônico:**  
**<http://www.molnlycke.com.br/instrucoesdeuso/>.**

**O formato impresso também poderá ser adquirido através do telefone:**  
**(90 11) 3016-8900 (SAC) sem custo adicional.**

“Produto médico não estéril”

**ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR, LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES. OBSERVE OS AVISOS E PRECAUÇÕES APRESENTADOS, PARA ASSEGURAR A EFICIENTE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.**

**APRESENTAÇÕES COMERCIAIS DO PRODUTO MÉDICO**

As embalagens unitárias do produto médico estão acondicionadas em caixa de papelão nas seguintes quantidades:

<b>Modelo Comercial</b>	<b>Tipo de produto</b>	<b>Tamanho nominal (cm x m)</b>	<b>Variação Largura em repouso(cm)</b>	<b>Variação Largura esticada (cm)</b>	<b>Variação Comprimento (m)</b>
<b>2434</b>	Tubifast® com 2-Way Stretch - Vermelho	3,5 x 10	3 - 4,5	14 - 18	10 - 10,6

<b>2436</b>	Tubifast® com 2-Way Stretch – Verde	5 x 10	5,0 – 6,5	19,5 – 24,5	10 – 10,6
<b>2438</b>	Tubifast® com 2-Way Stretch – Azul	7,5 x 10	7,5 – 9,5	30 – 36	10 – 10,6
<b>2440</b>	Tubifast® com 2-Way Stretch – Amarelo	10,75 x 10	12 – 13,5	41 – 49	10 – 10,6
<b>2444</b>	Tubifast® com 2-Way Stretch – Roxo	20 x 10	19 – 23	76 – 86	10 – 10,6

### **DESCRIÇÃO DO PRODUTO E MODO DE AÇÃO**

O produto mantém curativos no lugar, sem constrição ou compressão. Sua elasticidade leve permite que os pacientes possuam completa liberdade de movimento. O tecido de trama aberta e leve permite que o ar circule sobre a pele, ajudando na prevenção de maceração.

### **COMPOSIÇÃO:**

Tubifast® com 2-Way Stretch é composto por viscose, elastano e nylon (poliamida).

### **INDICAÇÃO DE USO**

Tubifast® com 2-Way Stretch é uma bandagem de malha lisa, indicado para manter/reter curativos no lugar em qualquer parte do corpo como parte da técnica de enfaixamento (seca e úmida) e como uma malha tubular.

### **INSTRUÇÕES DE USO**

1. Selecionar o tamanho correto de Tubifast® e cortar o comprimento, se necessário.
2. Abra a bandagem e estique sobre a área afetada.

Utilização individual. Múltiplos usos.



Os produtos são laváveis para reutilização, desde que não tenham sido sujos com fluidos corporais.



Máxima temperatura de lavagem 60°C. Secagem em tambor rotativo é permitida em temperatura mínima. Não utilizar alvejante. Não passar a ferro. Não limpar a seco.

### **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

- Mantenha limpo.
- Evite aproximar de chamas ou de outras fontes de ignição, especialmente quando utilizado juntamente com produtos à base de parafina.
- Em caso de sujidades no Tubifast® devido a fluidos corporais, descarte-o adequadamente e faça a devida substituição.
- Em casos de piora das condições, interrompa o uso e procure orientação médica.
- Se algum incidente sério ocorrer, relacionado ao uso do Tubifast®, este deve ser reportado a Molnlycke Health Care.

### **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

Deve ser armazenado em condições secas e temperatura entre 0° e 35°C.

Transportar o produto em sua embalagem original.

### **DESCARTE**

Deve ser seguido um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS - para o manejo, segregação e acondicionamento de resíduos conforme as diretrizes da RDC 222 de 2018 ou suas atualizações.

**VALIDADE:** Vide embalagem (05 anos)

**NÚMERO ANVISA:** 80733280009

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Rejane Vasques Biembengutt – CRBM 9150

**E-MAIL:** tecnovigilanciabr@molnlycke.com.br



**IMPORTADOR:**

MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

Av. Portugal, 1100 – Parte C43 – Itapevi, SP

**CEP:** 06696-060

**CNPJ:** 12.600.168/0001-17

**FABRICANTE LEGAL:**

Molnlycke Health Care AB, Gamlestadsvagen 3C, PO Box 13080, Gotenborg, SE-402 52 –  
Suécia

Fabricado no Reino Unido.